

BIJPASSENDE ACCESSOIRES:



EUROTEC zachte gordel van 5 cm breed.
De gordel zorgt voor extra steun en fixatie.

BESTELCODE	GESCHIKT VOOR BUIKOMVANG (GEMETEN OVER STOMA HEEN)
SB 50S	60-75 cm
SB 50M	75-90 cm
SB 50L	90-110 cm
SB 50XL	110-130 cm
SB 50XXL	>130 cm




CIRCLEMATE Stomapleister
Voorkomt omkrullen of loslaten van de plak, het uitdrogen van de randen of het slijmerig worden van de randen bij bijvoorbeeld zwemmen.

Beige: bestelcode **CMB 1590**
Wit: bestelcode **CMW 1590** (huidvriendelijker)



VARIMATE THIN Curve strips 3 x 9 cm
Voorkomt omkrullen of loslaten van de plak, het uitdrogen van de randen of het slijmerig worden van de randen. Bij overgevoeligheid voor pleisters. Geschikt voor op de geïrriteerde huid.

Bestelcode: **VMT CURVE**

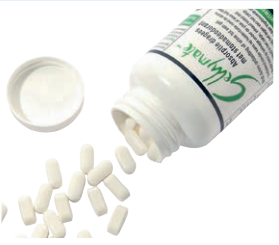

GELLYMATE dragees of capsules
Voor het indikken van dunne ontlasting in het zakje. Met stomadeodorant.

Bestelcode dragees: **GD 140**
Bestelcode capsules: **GM 140**

**WILT U HET GRATIS STOMAZAKBOEKJE
MET HANDIGE TIPS ONTVANGEN?
NEEM CONTACT MET ONS OP.**



GEbruikersINSTRUCTIE.

Voorbereiding.

1. Zorg ervoor dat alle benodigdheden klaar liggen zoals een mal, gebogen schaar, afvalzakje, pen, vochtige en droge gaasjes en een zakje.
2. Reinig de huid en stoma met lauw water en dep deze droog. De kleeflaag hecht het best als de huid nog iets klam is. Zeepresten grondig verwijderen. Gebruik geen olie of zalf.

Het knippen van de huidplak (indien van toepassing).

1. Knip de juiste vorm en maat uit bijgeleverd kartonnen maatkaartje.
2. Schuif het maatkaartje over de stoma en controleer of de opening goed past en niet te strak om de stoma zit. Er mag geen onbedekte huid meer zichtbaar zijn.
3. Als de opening goed om de stoma past, legt u het maatkaartje met de bedrukte zijde op het afdekpapier van de plak. Vervolgens tekent u de uitgeknipte opening op de plak af.
4. Knip de afgetekende vorm van de stoma uit de achterkant van de plak.
5. Via het kijkvenster kunt u voordat u het zakje aanbrengt de passing van de stomaopening nog controleren.

Het aanbrengen van het zakje.

1. Verwijder het afdekpapier van de plak, raak de kleeflaag hierbij zo min mogelijk aan.

2. Rek zo nodig de huidplak ietsje op, zodat de opening goed past rondom de stoma.
3. Breng de huidplak aan op een gladde huid en wrijf de plak stevig tegen de huid aan, vooral direct rondom de stoma. Via het kijkvenster kunt u bij het aanbrengen duidelijk zien of de kleeflaag goed rondom de stoma aansluit. De plak heeft op de huid enige tijd nodig om goed vast te hechten. Voorverwarmen is niet nodig.

Het verwijderen van het zakje.

Ondersteun de huid en 'pel' in één langzame beweging van boven naar beneden de huidplak van de huid af. Gooi het zakje niet in het toilet! Wanneer een dun kleeflaagje op de huid achterblijft, kan dat gerust blijven zitten en weer worden bedekt met de volgende plak.

Het openen, sluiten en legen van het zakje.

Klittenbandsluiting:

De ileostomiezakjes hebben een zgn. SoftSafe sluiting met Fingerpocket. De sluiting is te openen door het klittenband los te trekken en open te rollen. Om de onderzijde van het zakje te openen en te reinigen steekt u één of twee vingers in het hoesje (Fingerpocket). De sluiting is eenvoudig te sluiten door het uiteinde 5 maal om te vouwen. Wrijf vervolgens het geheel nog even aan.



EuroTec BV
Schotsbossenstraat 8
4705 AG Roosendaal

T 0165-551226
F 0165-541656

info@eurotec.nl
www.eurotec.nl

Ileomate

1-DELIGE ILEOSTOMIEZAKJES
SOFT-CONVEX



1-DELIGE ILEOSTOMIEZAKJES
SOFT-CONVEX

ILEOMATE is het 1-delig systeem van ledigbare stomazakjes van EuroTec. Deze stomazakjes hebben een zeer huidvriendelijke en soepele kleeflaag. Ze zijn er in veel voorgestante maten en hebben een stomaopening die gemakkelijk iets kan worden opgerekt. De kleeflaag is beschikbaar in vlak voor de normale stoma of bol (convex) voor een stoma op of onder huidniveau of als de vlakke huidplak lekkages geeft. De kleeflaag hecht het best als de huid nog iets klam is. De huidplak heeft op de huid enige tijd nodig om goed vast te hechten. Voorverwarmen is niet nodig.



UNIEKE KENMERKEN
HUIDPLAK:

- ✓ Zeer huidvriendelijke kleeflaag van volledig hydrocolloïd van 0,9 mm dik, zonder toegevoegde synthetische rubbers, die zeer goed vocht kan absorberen. Hierdoor hecht de huidplak beter en blijft de huid in topconditie bij warm weer of inspannende activiteiten.
- ✓ Huidplak kan op een extreem gevoelige of reeds geïrriteerde huid worden toegepast.
- ✓ De huidplak is zeer comfortabel in het dragen, door de zeer zachte schuimtoplaag en de extreem soepele bolle kleeflaag (soft-convex).
- ✓ Veel voorgestante maten; de druk van de bolling wordt zo dicht mogelijk bij de stoma gegeven voor een beter effect.
- ✓ Opreekbare stomaopening, die niet in de stoma kan insnijden. (Afbeelding 1)
- ✓ Eenvoudig op te rekken als deze iets te klein is of de stoma iets ovaal is. (Afbeelding 1)
- ✓ Knippen bijna nooit meer nodig. (Afbeelding 1)
- ✓ Unieke 4-punts gordelaansluiting. (Afbeelding 2)



UNIEKE KENMERKEN
ILEOSTOMIEZAKJES:

- ✓ Extra lang werkend staafilter; darmgassen worden vanzelf reukloos afgevoerd. (Afbeelding 3)
- ✓ Standaard voorzien van een Gore-tex filtermembraan om doorleken of afgeven aan de kleding te voorkomen.
- ✓ Beige zakje met kijkvenster, waardoor u de stoma tussentijds kunt inspecteren en het aanbrengen op de huid eenvoudiger is. (Afbeelding 4)
- ✓ Ledigbaar zakje met speciale SOFTSAFE klittenbandsluiting. U rolt de afvoeropening 5 slagen op, wrijft deze even aan en het zakje is hermetisch gesloten.
- ✓ Praktische 'Finger Pocket' (Afbeelding 5), om met één hand de afvoer eenvoudig te openen en te reinigen.
- ✓ U kunt het zakje inkorten door de sluiting één keer extra op te rollen en onder de voorzijde van het zakje te vouwen (Afbeelding 6)



ILEOMATE ILEOSTOMIEZAKJES
MET BOLLE KLEEFILAAG

Bolle huidplak voor stoma op of onder huidniveau.

LARGE BEIGE MET KIJKVENSTER
Verpakt per 10 stuks.



BESTELCODE	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
ILTC 113-35	13 mm (start)	35 mm
ILTC 113-44	13 mm (start)	44 mm
IXLTC 113-54	13 mm (start)	54 mm
ILTC 119	19 mm	21 mm
ILTC 122	22 mm	24 mm
ILTC 125	25 mm	27 mm
ILTC 128	28 mm	31 mm
ILTC 132	32 mm	34 mm
ILTC 135	35 mm	37 mm
ILTC 138	38 mm	40 mm
ILTC 141	41 mm	44 mm

MEDIUM BEIGE MET KIJKVENSTER
Verpakt per 10 stuks.



BESTELCODE	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
IMTC 113-35	13 mm (start)	35 mm
IMTC 113-44	13 mm (start)	44 mm
IMTC 119	19 mm	21 mm
IMTC 122	22 mm	24 mm
IMTC 125	25 mm	27 mm
IMTC 128	28 mm	31 mm
IMTC 132	32 mm	34 mm

ILEOMATE ILEOSTOMIEZAKJES
MET BOLLE KLEEFILAAG OVAAL

Bolle huidplak voor ovaal stoma op of onder huidniveau.

LARGE BEIGE MET KIJKVENSTER.
Verpakt per 10 stuks.



BESTELCODE	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
ILTCO 113-44	13 mm (start)	44 x 29 mm
ILTCO 113-54	13 mm (start)	54 x 37 mm

ILEOMATE ILEOSTOMIEZAKJES
MET BOLLE KLEEFILAAG OVAAL VERTICAAL

Bolle huidplak voor verticaal ovaal stoma op of onder huidniveau.

LARGE BEIGE MET KIJKVENSTER.
Verpakt per 10 stuks.



BESTELCODE	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
ILTCO 113-44V	13 mm (start)	29 x 44 mm
ILTCO 113-54V	13 mm (start)	37 x 54 mm